

Accu-Tell[®] Multi-7 Drug Panel (Urine)



KEMENKES RI AKL 20103220070




Accu-Tell[®] Multi-7 Drug Panel (Urine) adalah immunoassay kromatografi cepat untuk deteksi kualitatif beberapa zat/metabolit obat dalam urin



Parameter 7 pemeriksaan:

- Amfetamin (AMP)
- Metamfetamin (MET)
- Benzodiazepin (BZO)
- Mariyuana/Ganja (THC)
- Morfin (MOP)
- Kokain (COC)
- Carisoprodol (CAR)

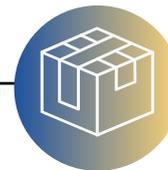

1 box Accu-Tell[®] Multi-7 Drug Panel (Urine) berisi:

- 15 panel uji
- 7 lembar insert pack

Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055

info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo.intertama | @isotekindo



linktr.ee/isotekindo


PREPARASI SAMPEL

- Spesimen urin harus disimpan dalam wadah yang bersih & kering
- Spesimen urin yang digunakan untuk pengujian bisa menggunakan urin kapan saja (tidak harus urin pagi)
- Apabila spesimen urin terlihat keruh, maka harus disentrifugasi, disaring, atau dibiarkan mengendap terlebih dahulu untuk mendapatkan spesimen yang jelas untuk pengujian
- Spesimen urin dapat disimpan pada suhu 2-8°C hingga 48 jam sebelum pengujian
- Untuk penyimpanan yang lama, spesimen dapat dibekukan dan disimpan di bawah -20°C. Spesimen urin yang beku harus dicairkan dan dicampur dengan baik sebelum pengujian

PROSEDUR PENGGUNAAN

Sebelum dilakukan pengujian, kondisikan panel uji & spesimen urin ke suhu ruangan (15-30°C)

1. Keluarkan panel uji dari kemasan foil dan gunakan dalam waktu satu jam
2. Lepaskan tutup panel uji
3. Rendam panel uji ke dalam spesimen urin secara vertikal selama 10 - 15 detik. Benamkan strip minimal setinggi garis bergelombang dan jangan melebihi tanda panah diatas panel uji
4. Pasang kembali tutup panel dan letakkan panel uji pada permukaan datar yang tidak menyerap
5. Mulai *timer* dan tunggu hingga garis berwarna muncul
6. Hasilnya harus dibaca pada 5 menit. Jangan menafsirkan hasil setelah 10 menit

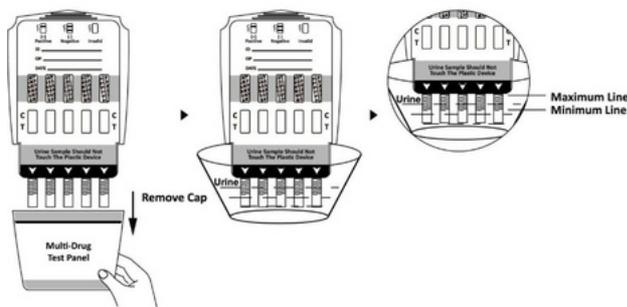

NILAI CUT-OFF

- Amfetamin (AMP) 500 ng/mL
- Metamfetamin (MET) 500 ng/mL
- Benzodiazepin (BZO) 300 ng/mL
- Mariyuana (THC) 50 ng/mL
- Morfin (MOP) 300 ng/mL
- Kokain (COC) 300 ng/mL
- Carisoprodol (CAR) 1.000 ng/mL

Accu-Tell[®] Multi-7 Drug Panel (Urine) akan memberikan hasil positif ketika konsentrasi zat dalam urin melebihi nilai *cut-off*

INTERPRETASI HASIL



Positif

HASIL POSITIF: Garis berwarna

hanya muncul di wilayah Kontrol (C). Hasil positif berarti bahwa konsentrasi obat dalam sampel urin lebih besar dari nilai *cut-off* yang ditentukan untuk obat tertentu



Negatif

HASIL NEGATIF: Terbentuk dua

garis berwarna di wilayah kontrol (C) dan di wilayah tes (T). Hasil negatif berarti bahwa konsentrasi dalam sampel urin berada di bawah nilai *cut-off* yang ditentukan untuk obat tertentu yang diuji

Note: Intensitas warna akan bervariasi. Bahkan jika ada garis samar maka hasil dapat dipertimbangkan sebagai negatif



Invalid

HASIL INVALID: Tidak ada

garis yang muncul di wilayah Kontrol (C). Volume spesimen yang tidak mencukupi atau teknik prosedur yang salah dapat menyebabkan hasil invalid. Ulangi tes dengan menggunakan panel tes yang baru.

Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055

info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo intertama | @isotekindo



linktr.ee/isotekindo