



KEMENKES RI AKL 20101910675 (ALAT)  
KEMENKES RI AKL 20101511889 (STRIP ASAM URAT)

# UASure®

Blood Uric Acid Monitoring System

## DETEKSI ASAM URAT DENGAN MUDAH

**IMPORTIR DAN DISTRIBUTOR RESMI**

**PT ISOTEKINDO INTERTAMA**

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12210, Indonesia

P: +62.21.5305073 - 74 | F: +62.21.5304939 | M: +62.811.171.0055 (Call & Whatsapp) |

E: info@isotekindo.co.id

www.isotekindo.co.id



**INFORMASI LEBIH LANJUT,  
KLIK ATAU SCAN QR CODE DI ATAS:**

# UASure<sup>®</sup>

Blood Uric Acid Monitoring System



## FITUR DAN MANFAAT



**Rentang pemeriksaan kadar asam urat lebar (3 - 20 mg/dL)**  
Menjamin hasil uji kuantitatif dapat dilakukan baik dalam kondisi asam urat yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah



**Sampel darah yang diperlukan sedikit (3  $\mu$ L)**  
Meminimalkan rasa nyeri pada saat pemeriksaan karena tidak harus menusuk terlalu dalam



**Waktu pemeriksaan singkat**  
Hanya dengan waktu 30 detik, anda sudah dapat mengetahui kadar asam urat dalam darah



**Pengoperasian 1 tombol**  
Alat dapat digunakan dengan mudah hanya dengan menekan 1 tombol yang sama

## SPESIFIKASI

Parameter	Keterangan
Kisaran Uji	3-20 mg/dL (179-1190 $\mu$ mol/L)
Volume Sampel	Minimum 3 $\mu$ L
Kisaran Hematokrit	35 - 50%
Tipe Tampilan	Layar LCDBesar
Memori	10 hasil tes darah
Waktu Pengukuran	30 detik
Ukuran	100L x 58W x 21H (mm)
Berat	64 g
Baterai	1 x CR 2032 3V Lithium coin cell battery
Daya tahan baterai	1.000 tes penggunaan
Tombol Pemeriksaan	Tunggal

# UASure®

*Blood Uric Acid Monitoring System*



## CARA PENGGUNAAN

Setelah alat dinyalakan\*, berikut langkah penggunaan alat selanjutnya:

### Langkah 1

Pasang tes strip ke dalam alat.

### Langkah 2

Pijat dengan lembut tangan dan jari ke arah tusukan kemudian tusuk menggunakan lancet. Ambil setetes darah dari ujung jari, tempelkan jari ke bagian sensor.



### Langkah 3

Layar akan menampilkan bar timing "----", dan hasil akan diperoleh sekitar 30 detik.



### Langkah 4

Setelah selesai digunakan, lepaskan strip tes dengan cara ditarik, kemudian buang ke limbah infeksius, sementara alat dapat disimpan kembali. Hasil pengukuran yang dilakukan akan tersimpan secara otomatis.



\*Keterangan lebih rinci, dapat dibaca di kertas petunjuk penggunaan

#### IMPORTIR DAN DISTRIBUTOR RESMI

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12210, Indonesia

P: +62.21.5305073 - 74 | F: +62.21.5304939 | M: +62.811.171.0055 (Call & Whatsapp) |

E: info@isotekindo.co.id

www.isotekindo.co.id



**INFORMASI LEBIH LANJUT,  
KLIK ATAU SCAN QR CODE DI ATAS:**