


DETERJEN-DISINFECTAN
ALAT KESEHATAN
KELAS IIB

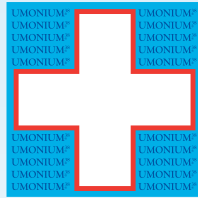

UMONIUM³⁸ INSTRUMENTS



FORMULA BEBAS DARI

- KOMPONEN CMR**
- DISRUPTOR ENDOKRIN

** Carcinogenic, Mutagenic and Reprotoxic

“ Deterjen-disinfektan
non-korosif ”



UMONIUM³⁸ INSTRUMENTS menghilangkan kotoran organik dan mendekontaminasi spektrum luas instrumen yang ditangani. Sangat cepat dalam membasmi strain kuman rumah sakit yang paling resisten (MRSA, HIV, HCV, HBV, dll.) dalam waktu kontak yang cepat & praktis. Produk unggulan ini memastikan disinfeksi kinerja ultra dan membuat instrumen medis bedah menjadi berkilau. Tidak membentuk gas beracun, tidak menjadi disruptor endokrin. Tidak ada bahaya korosi instrumen, cairan dapat terurai secara hayati dan dapat dibuang di bak cuci.

Importir dan Distributor Resmi:
PT ISOTEKINDO INTERTAMA

isotek
Advancing Healthcare

**laboratoire
HUCKERT'S**
INTERNATIONAL
mastered disinfection



www.huckerts.net



UMONIUM³⁸ INSTRUMENTS



FORMULA BEBAS DARI

- KOMPONEN CMR**
- DISRUPTOR ENDOKRIN

INDIKASI

Pembersihan dan disinfeksi untuk alat kesehatan invasif sebelum sterilisasi.

KOMPOSISI

N-benzil-N-dodesil-N, N-dimetil-amonium klorida/N-benzil-N, N-dimetil-N-tetradesil amonium klorida. 99g/L.

STANDAR PERATURAN

- Mematuhi ED 93/42/EEC yang berkaitan dengan perangkat medis (lampiran II, kecuali S4)
- Kualitas & keterlacakan dijamin oleh ISO 9001:2015 dan EN ISO 13485:2016

INSTRUKSI PENGGUNAAN

Pembersihan/Pre-disinfeksi:

Gunakan pada 0,5% (25 mL/5 L air*). Rendam. Gosok alat kesehatan atau gunakan ultrasound untuk menghilangkan semua kotoran. Bilas sampai bersih dengan air*.

Disinfeksi: Gunakan pada 2,5% (25 mL/L air*) pada alat kesehatan yang bersih. Pastikan untuk mematuhi waktu perendaman minimum 10 menit. Bilas sampai bersih dengan air*.

UMONIUM³⁸ INSTRUMENTS tidak menggantikan prosedur sterilisasi.

KARAKTERISTIK PRODUK

- Alat kesehatan kelas IIb
- Deterjen-disinfektan dengan spektrum aktivitas yang luas
- Tidak beracun, tidak ada uap berbahaya
- LD₅₀ (tikus): 5840 mg/kg
- Non-korosif: pH 7
- Tidak mengiritasi kulit (tidak ada toksisitas transdermal)
- Bebas aldehida, peroksida dan biguanida, tidak ada komponen karsinogenik, mutagenik, reprotoksik lainnya
- Non-koagulan
- Tidak mudah terbakar
- Bakterisida, fungisida, mikobakterisida (termasuk MRSA) dan virusida
- 100% kompatibel pada serat optik, karet, polikarbonat, senyawa akrilik, kaca, Pyrex, PU, PVC, HDPE, PET, neoprene, lateks, silikon, cat, dan baja tahan karat 410
- Efektif, cepat dan efisien (dalam melarutkan darah)
- Efektif meskipun ada bahan organik
- Waktu disinfeksi: 10 menit.
- Tidak ada residu setelah dibilas
- Stabilitas: 36 bulan sejak tanggal pembuatan
- Dapat terurai secara hayati

* Air minum bersih pada suhu kamar

** Carcinogenic, Mutagenic and Reprotoxic




NO BARANG	NAMA BARANG	BOKS
PF 12110	Botol 1 L	12 x 1 L
PF 12112	Galon 5 L dengan pompa	4 x 5 L
PF 12153	Botol 125 mL	24 x 125 mL
EMB 0013	ECONOMATIC pompa kit lengkap - Dosis 0.5 %	1 barang
EMB 0013 - 2.5%	ECONOMATIC pompa kit lengkap - Dosis 2.5 %	1 barang

PROSEDUR PENGGUNAAN

LANGKAH ① : PEMBERSIHAN/PRE-DISINFEKSI

➔ Penggunaan bath secara batch

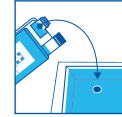

Gunakan pada 0,5% (25 mL/5 L air*)



Rendam lalu gosok/ gunakan ultrasound untuk menghilangkan kotoran



Bilas dengan air*

LANGKAH ② : DISINFEKSI

➔ Rendam sampai terlihat keruh



Gunakan pada 2,5% (25 mL/L air*)



Patuhi waktu kontak minimum 10 menit



Bilas dengan air*

DATA TEKNIS

Standar	Target organisme	Waktu Kontak (min.) 2,5%
EN 1040	<i>S. aureus</i> , <i>P. aeruginosa</i>	5
EN 13727	<i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i> <i>P. aeruginosa</i>	10
EN 14561	<i>S. aureus</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>E. hirae</i>	30
-	MRSA, ESBL-producing <i>Klebsiella pneumoniae</i>	5
EN 1275	<i>C. albicans</i>	10
EN 13624	<i>C. albicans</i> , <i>A. niger</i>	
EN 14562		
EN 14476	Adenovirus, Poliovirus, Norovirus	1
-	HBV, HSV, HCV, H5N1	5
EN 14348	<i>M. avium</i> , <i>M. terrae</i>	10
EN 14563		

FP00032 EN - Ed. 32 - 02/2019

www.huckerts.net



BELGIUM
20 Avenue Lavoisier
1300 Wavre
Tel.: +32 (0)67 89 41 00
Fax: +32 (0)67 84 37 67

FRANCE
38 Avenue du Centre
78230 Le Pecq-sur-Seine
Tel.: +33 (0)1 3976 1505
Fax: +33 (0)1 3976 1115

G.D. LUXEMBOURG
19 Rue de l'Industrie
8069 Bertrange
Tel.: +352 26 39 42 60
Fax: +352 26 39 42 70

ITALY
20 Via Giulio Natta
05100 Terni
Tel.: +39 0744 80 03 87
Fax: +39 0744 81 73 39

SINGAPORE
51 Changi Business Park Central 2
The Signature, #04-05
Singapore 486066
Tel: +65 983 45 333

Importir dan Distributor Resmi

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, 12210 | 021-5305073/74 | 0811-171-0055
info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | Isotekindo Intertama | @isotekindo



https://linktr.ee/isotekindo