


DETERJEN-DISINFEKTAN
ALAT KESEHATAN
KELAS IIB

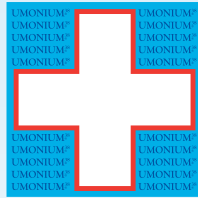

UMONIUM³⁸ MEDICAL SPRAY



FORMULA BEBAS DARI

- KOMPONEN CMR**
- DISRUPTOR ENDOKRIN

** Carcinogenic, Mutagenic and Reprotoxic

DISINFEKSI CEPAT
1 MENIT



“ Waktu kontak 1 menit:
senjata andalan ”



Bebas aldehida, peroksida, biguanida (CMR), **UMONIUM³⁸ MEDICAL SPRAY** adalah senjata terbaik dalam melawan kontaminasi mikroba. Aktif dalam 1 menit waktu kontak. Disinfeksi spektrum luas, ideal untuk lingkungan apa pun yang membutuhkan disinfeksi harian. Tidak menimbulkan risiko bagi operator, pasien, peralatan atau lingkungan. Sederhana dan ergonomis, fungsi pistol ganda memproyeksikan busa yang ideal untuk pembersihan atau semprotan jet untuk disinfeksi yang optimal. Direkomendasikan aplikasi pemakaian untuk bahan rapuh seperti plexiglas, silikon, poliuretan, karet, dll.

Importir dan Distributor Resmi:
PT ISOTEKINDO INTERTAMA

isotek
Advancing Healthcare

**laboratoire
HUCKERT'S**
INTERNATIONAL
mastered disinfection

www.huckerts.net





UMONIUM³⁸ MEDICAL SPRAY

1 x 1 L botol =
1000 spray = 200m²



FORMULA BEBAS DARI

- KOMPONEN CMR**
- DISRUPTOR ENDOKRIN

INDIKASI

Pembersihan dan disinfeksi untuk alat kesehatan invasif sebelum sterilisasi. Pembersihan dan disinfeksi untuk alat kesehatan non-invasif dan permukaannya. Transportasi alat kesehatan kotor.

KOMPOSISI

N-benzil-N-dodesil-N,N-dimetil-amonium klorida/N-benzil-N, N-dimetil-N-tetradesil-amonium klorida. 3,3 g/L.

STANDAR PERATURAN

- Mematuhi ED 93/42/EEC yang berkaitan dengan perangkat medis (lampiran II, kecuali §4)
- Kualitas dan keterlacakan dijamin oleh ISO 9001:2015 dan EN ISO 13485:2016

INSTRUKSI PENGGUNAAN

Transportasi: Atur semprotan ke posisi "busa" sampai alat kesehatan tertutupi dengan busa. Pastikan untuk menutup wadah dengan baik untuk membatasi penguapan.

Pembersihan/Pre-disinfeksi: Atur semprotan ke posisi "busa". Semprot dan gosok alat kesehatan untuk menghilangkan semua kotoran. Bilas dengan air* atau gunakan kain basah untuk membersihkan permukaan.

Disinfeksi: Atur semprotan ke posisi "semprotan halus". Semprotkan pada alat kesehatan yang bersih. Pastikan waktu kontak minimal 5 menit.

Jika membersihkan alat kesehatan invasif: Bilas dengan air*.

Jika membersihkan permukaan alat kesehatan non-invasif: Biarkan kering atau bilas dengan air* (atau gunakan kain basah jika perlu).

KARAKTERISTIK PRODUK

- Alat kesehatan Kelas IIb
- Deterjen-disinfektan dengan spektrum aktivitas yang luas
- Tidak beracun, tidak ada uap berbahaya
- LD₅₀ (tikus): > 5840 mg/kg
- Non-korosif: pH 7
- Produk siap pakai tidak mengiritasi kulit (tanpa toksisitas transdermal)
- Bebas aldehida, peroksida dan biguanida, tidak ada komponen karsinogenik, mutagenik, reprotoksik lainnya
- Non-koagulan
- Tidak mudah terbakar
- Bakterisida, fungisida, mikobakterisida (termasuk MRSA) dan virusida
- 100% kompatibel pada serat optik, karet, polikarbonat, senyawa akrilik, kaca, Pyrex, PU, PVC, HDPE, PET, neoprene, lateks, silikon, cat, dan baja tahan karat 410
- Efektif, cepat dan efisien (dalam melarutkan darah)
- Efektif meskipun ada bahan organik
- Bekerja sejak menit pertama
- Tetap pada permukaan yang tidak dibilas (film bakteriostatik)
- Tidak ada residu setelah dibilas
- Stabilitas: 36 bulan sejak tanggal pembuatan
- Dapat terurai secara hayati


* Air minum bersih pada suhu kamar
** Carcinogenic, Mutagenic and Reprotoxic




NO BARANG	NAMA BARANG	BOKS
PF 12209	Botol Spray 1 L	12 x 1 L
PF 12204	Botol Spray 500 mL	24 x 500 mL
PF 12203	Botol Spray 250 mL	24 x 250 mL
EMB 5206	Braket botol 1-L stainless steel	1 barang

PROSEDUR PENGGUNAAN

LANGKAH ① : TRANSPORTASI

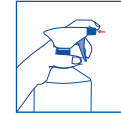

Atur semprotan ke posisi "busa"

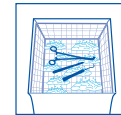


Semprot sampai alat kesehatan tertutupi dengan busa.



Pastikan untuk menutup wadah dengan baik untuk membatasi penguapan.

LANGKAH ② : PEMBERSIHAN/PRE-DISINFEKSI

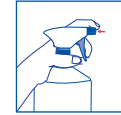

Atur semprotan ke posisi "busa"



Semprot dan gosok alat kesehatan untuk menghilangkan semua kotoran.




Bilas dengan air* atau gunakan kain basah untuk membersihkan permukaan.

LANGKAH ③ : DISINFEKSI



Atur semprotan ke posisi "semprotan halus".

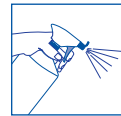

Semprot



Pastikan waktu kontak minimal 5 menit.



Atau



Jika membersihkan alat kesehatan invasif: Bilas dengan air* atau jika membersihkan permukaan alat kesehatan non-invasif: Biarkan kering atau bilas dengan air* (atau gunakan kain basah) jika perlu.

DATA TEKNIS

Standar	Target organisme	Waktu Kontak (min.)
EN 1040	BAKTERI <i>S. aureus</i> , <i>P. aeruginosa</i>	5
EN 13727		1
EN 14561		30
-	BAKTERI MRSA, ESBL-producing <i>Klebsiella pneumoniae</i>	5
EN 1275	JAMUR <i>C. albicans</i>	1
EN 13624		10
EN 14562		10
EN 14476	VIRUS Adenovirus, Poliovirus, Norovirus	1
-		5
EN 14348	MIKOBAKTERIA <i>M. avium</i> , <i>M. terrae</i>	10
EN 14563		10

FP00022 EN - Ed. 3.2 - 02/2019

www.huckerts.net



BELGIUM
20 Avenue Lavoisier
1300 Wavre
Tel.: +32 (0)67 89 41 00
Fax: +32 (0)67 84 37 67

FRANCE
38 Avenue du Centre
78230 Le Pecq-sur-Seine
Tel.: +33 (0)1 3976 1505
Fax: +33 (0)1 3976 1115

G.D. LUXEMBOURG
19 Rue de l'Industrie
8069 Bertrange
Tel.: +352 26 39 42 60
Fax: +352 26 39 42 70

ITALY
20 Via Giulio Natta
05100 Terni
Tel.: +39 0744 80 03 87
Fax: +39 0744 81 73 39

SINGAPORE
51 Changi Business Park Central 2
The Signature, #04-05
Singapore 486066
Tel.: +65 983 45 333

Importir dan Distributor Resmi

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, 12210 | ☎ 021-5305073/74 | 📠 0811-171-0055
✉ info@isotekindo.co.id | 🌐 www.isotekindo.co.id | 📱 isotekindo Intertama | 📧 @isotekindo



https://linktr.ee/isotekindo